

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В состав комплекта входят:

- очки;
- пластиковый пакет с застежкой;
- инструкция по эксплуатации;
- специальная салфетка;
- чехол.

Комплект может быть упакован в картонную коробку или снабжен информационной биркой.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Очки должны храниться в условиях по ГОСТ 15150, в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C.

Условия хранения – УХЛ 4 (ГОСТ Р 51193-2009).

Не допускается совместное хранение очков с агрессивными к органическим и металлическим материалам химическими продуктами и растворителями.

Очки не имеют срока годности.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ 9442-003-18257283-07.

Изготовитель гарантирует надежность соединения линз с оправой в течение 6 месяцев со дня начала эксплуатации очков при соблюдении правил по уходу, указанных в настоящей инструкции.

Согласно ГОСТ Р 51193-2009 механические повреждения оправ или линз не могут являться основанием для претензий изготовителю очков. Очки не подлежат обмену или возврату. В случае рекламации обращайтесь к продавцу или изготовителю для консультации.

СЕРТИФИКАТЫ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Релаксационные комбинированные очки соответствуют технической документации, ГОСТ Р 51193-2009.

Очки релаксационные комбинированные (светофильтры №№ 2, 4) успешно прошли сертификацию и имеют государственную медицинскую регистрацию.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Алис-96»
Адрес: 141070 РФ, Московская область, г. Королёв,
ул. Пионерская, д. 17/15
Тел./факс: + 7 (495) 663-96-05
www.alis96.ru
info@alis96.ru



ИНСТРУКЦИЯ

по применению релаксационных комбинированных очков для активного отдыха (светофильтры №№ 2, 4)

Вы приобрели релаксационные комбинированные очки для активного отдыха (далее – очки для активного отдыха) производства компании ООО «Алис-96». Линзы очков разработаны под руководством академика С.Н. Федорова.

В инструкции содержатся рекомендации по использованию очков для активного отдыха, а также информация по уходу за очками. Перед применением очков рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

НАЗНАЧЕНИЕ

Очки для активного отдыха с желтой линзой (светофильтр № 2) предназначены для улучшения видимости, повышения контрастности в вечернее и ночное время, туман, дождь, а также для защиты от ослепления фарами встречных автомобилей.

Очки для активного отдыха с коричневой линзой (светофильтр № 4) предназначены для защиты глаз от солнца.

Очки рекомендованы к применению:

- езда на велосипеде;
- спортивные игры, ролики;
- пешие прогулки, туризм.

С желтыми линзами: в условиях плохой видимости, в вечернее и ночное время.

С коричневыми линзами: в солнечную погоду.

Очки для активного отдыха также обладают профилактическими свойствами, снижая нагрузку на глаза, связанную с длительным напряжением глаз, и ускоряя восстановление их функционального состояния. При использовании очков улучшаются контрастная и цветовая чувствительность, а также разрешающая способность (острота зрения).

СВОЙСТВА

Защитные:

- полностью задерживают ультрафиолетовые (UV) лучи;
- поглощают значительную часть вредного фиолетово-синего излучения.

Релаксационные:

- способствуют быстрому восстановлению функционального состояния глаз;
- замедляют процесс старения клеток глаза;
- оптимизируют интенсивность пропускаемого света по каждому фрагменту видимого спектра.

Улучшающие изображение:

- повышают четкость изображения;
- усиливают контрастность;
- обеспечивают эффект «дневного света» (желтая линза).

Линзы очков для активного отдыха могут быть с нулевой рефракцией и корректирующей (до ± 2 дптр).

Корректирующие очки для активного отдыха изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с рецептом офтальмолога.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Очки для активного отдыха имеют высокую пропускную способность светофильтров в определенной, так называемой «релаксационной» части красной области спектра, что способствует ускорению обменных процессов и активному восстановлению функционального состояния клеток. Очки являются профилактическим средством предупреждения заболеваний глаз.

При использовании очков для активного отдыха с желтыми линзами повышается четкость и качество изображения, дальность резкого видения, повышается зрительный и цветовой комфорт в пасмурную погоду и сумерки, снижается чувствительность к ослеплению.

Коричневые линзы снижают интенсивность солнечного света, уменьшают нагрузку на глаза, связанную с напряжением зрения.

При использовании очков для активного отдыха достигается оптимизация световой нагрузки, вследствие чего повышаются резервы аккомодации и конвергенции, снижается усталость глаз, замедляется старение их биологических структур.

ОПИСАНИЕ

Линзы очков для активного отдыха изготовлены из пластика со специальным светофильтром, отсекающим большую часть фиолетово-синего спектра. Линзы имеют насыщенный желтый цвет (светофильтр № 2) и умеренно-коричневый (светофильтр № 4).

Оправы и линзы изготовлены из экологически чистых материалов. Линзы очков выполнены из безопасного нетравматичного пластика.

ПОДБОР МОДЕЛИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Очки для активного отдыха предназначены для мужчин, женщин и детей. Возрастных ограничений по использованию очков нет.

Модели оправ очков для активного отдыха выполнены с учетом анатомических особенностей строения головы человека с целью обеспечения максимального комфорта при длительном ношении и активном движении. Очки обладают минимальным весом за счет использования облегченных материалов оправ и пластиковых линз.

При подборе модели очков для активного отдыха обращайтесь внимание на следующие факторы:

- очки не оказывают давления в местах соприкосновения с кожей;

- оправа очков плотно прилегает к переносице;
- линза полностью закрывает глаз;
- заушник обеспечивает фиксацию оправы на лице.

При первом применении очков для активного отдыха с желтыми линзами Вы можете испытывать небольшой дискомфорт, который обычно проходит через непродолжительное время.

Вы можете использовать очки для активного отдыха, если Вы носите контактные линзы.

Срок эксплуатации ограничивается только износом поверхности линз или механическим повреждением оправы или линзы.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Исследования по применению очков не проводились при наличии:

- сопутствующей патологии органа зрения (близорукости высокой степени, катаракты, патологии макулярной зоны);
- наследственных дегенераций сетчатки;
- цветоаномалий;
- тяжелой соматической патологии (субкомпенсированного сахарного диабета, гипертонической болезни).

При наличии вышеперечисленных заболеваний или их симптомов, а также при дискомфорте при использовании очков для активного отдыха, обратитесь к специалисту для консультации.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ

1. Избегайте падения очков на твердые поверхности, а также механических нагрузок, способных повредить оправу и линзы.
2. Не кладите очки линзами вниз на твердую поверхность.
3. Для хранения очков используйте защитный чехол. Не носите очки в карманах одежды или сумках во избежание появления царапин и механических повреждений.
4. Используйте только специальные салфетки для очищения линз очков.
5. Не прилагайте значительных усилий при протирке линз очков.
6. Не допускается применение любых типов растворителей и жидкостей, кроме специально предназначенных для ухода за линзами. При загрязнении очков промойте их под струей холодной воды и аккуратно протрите специальной салфеткой насухо.
7. Допускается использование очков при наличии небольших отдельных царапин на поверхности линз.
8. При необходимости отрегулируйте длину дужек очков. Для этого погрузите заушник очков (пластмассовая часть дужки) на 35-45 секунд в горячую воду (но не кипящую), а затем укоротите или удлините дужку, изгибая нагретый заушник.
9. Не допускается использование очков с механическими повреждениями в виде режущих выступов и других дефектов, способных привести к травмам при эксплуатации очков.